

ACCUNIQ MANAGER

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Spis treści

ROZPOCZĘCIE	3
WYMAGANIA SYSTEMOWE	3
REJESTRACJA KONTA CENTRUM	3
LOGOWANIE	3
PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ	4
INFORMACJE EKRAKOWE ACCUNIQ MANAGER	4
WYKONYWANIE POMIARÓW	5
ROZPOCZYNANIE POMIARU	5
POMIAR CIĄGŁY	5
WYŚWIETLANIE WYNIKÓW POMIARÓW PACJENTÓW	7
PRZEGLĄDANIE WYKRESÓW TRENDÓW	7
PRZEGLĄDANIE SZCZEGÓŁÓW WYNIKÓW POMIARÓW	7
ZARZĄDZANIE WYNIKAMI POMIARÓW	8
ZARZĄDZANIE PACJENTAMI	9
DODAWANIE PACJENTÓW	9
PRZEGLĄDANIE INFORMACJI O PACJENCIE I DODAWANIE NOTATEK	9
SORTOWANIE LISTY PACJENTÓW	9
ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI O PACJENCIE/ EKSPORT	9
WYSZUKIWANIE PACJENTÓW	10
ZARZĄDZANIE KONTEM CENTRUM	11
ZARZĄDZANIE KONTEM CENTRUM	11
LOGOWANIE DO CENTRUM	11
WYSZUKIWANIE ID KONTA CENTRUM	11
WYSZUKIWANIE HASŁA KONTA CENTRUM	11
USTAWIENIA	13
JĘZYK I LOKALIZACJA	13
ZDEFINIOWANA LISTA PACJENTÓW	13
PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA	13
POŁĄCZENIE URZĄDZENIA	13
POŁĄCZENIE BLUETOOTH	14
ZARZĄDZANIE DANYMI	18
WERSJA	19
INFORMACJE DODATKOWE	20



Rozpoczęcie

Dziękujemy za wybranie ACCUNIQ MANAGER.

Użyj płyty CD z programem ACCUNIQ MANAGER, która była dołączona w zestawie. Alternatywnie, przejdź na stronę internetową ACCUNIQ www.accuniq.com, wybierz "Customer Support" > "Download," a następnie pobierz i zainstaluj "ACCUNIQ MANAGER."

Przed instalacją, zapoznaj się szczegółowo z wymaganiami systemowymi.


Wymagania systemowe

- System operacyjny: Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows 8 (32 bit/64 bit), Windows 10(32 bit/64 bit)
- Rozdzielczość: 1280x800 lub wyższa
- Internet: Połączenie internetowe jest wymagane do aktualizacji programów i zarządzania kontem / pacjentami za pomocą Cloud Type.

Rejestracja konta centrum

Po uruchomieniu narzędzia ACCUNIQ MANAGER kliknij na ekranie logowania opcję [Zarejestruj się w centrum](#).

Wprowadź w polach informacyjnych swój ID, hasło, nazwę centrum i numer telefonu. ID centrum nie może być zmieniony po rejestracji, więc należy zachować ostrożność podczas wybierania.

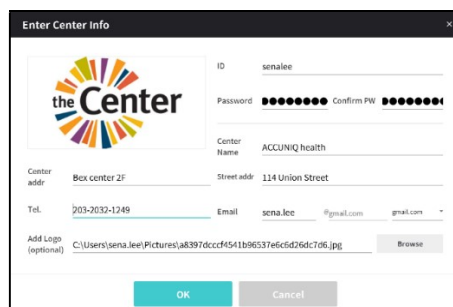

Twój adres e-mail może zostać wykorzystany do odzyskania zapomnianego identyfikatora lub hasła centrum. Upewnij się, że podałeś prawidłowy adres e-mail.

Aby dodać logo informacyjne centrum, wybierz plik typu JPG, JPGE, PNG, lub GIF, nie większy niż 296x70.

- 5 Po wypełnieniu wszystkich pól, kliknij [OK](#), aby zakończyć rejestrację.

Logowanie

(To menu dotyczy tylko pakietu Cloud Type)

Możesz zalogować się za pomocą ID i hasła podanego podczas rejestracji.


Zaznacz pole wyboru **Nie wylogowuj mnie**, aby korzystać z systemu natychmiast po uruchomieniu programu, bez konieczności ponownego logowania się.

Podłączanie urządzeń

Po włączeniu analizatora składu ciała, podłącz go do komputera PC za pomocą kabla USB.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Połączenie z urządzeniem

Następnie wybierz urządzenie z listy podłączonych urządzeń USB.

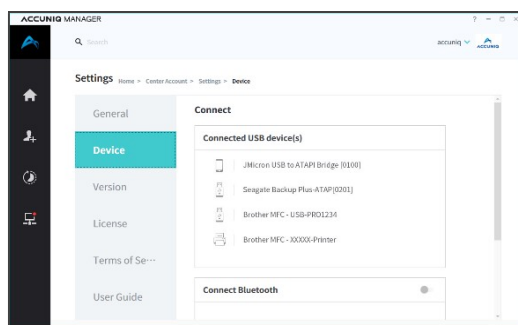

Po nawiązaniu połączenia, ikona połączenia z urządzeniem zmieni się na

Informacje ekranowe ACCUNIQ MANAGER


- Na ekranie głównym programu sprawdź listę zarejestrowanych użytkowników.
- Dodaj pacjenta. Po więcej informacji odnieś się do [Zarządzanie pacjentami > Dodawanie pacjentów](#).
- Ta funkcja pozwala mierzyć wielu pacjentów po kolei. Po więcej informacji odnieś się do [Pomiar pacjenta > Pomiar ciągły](#).
- Jest to skrót do połączenia urządzenia. Po więcej informacji odnieś się do [Ustawienia > Podłączanie urządzenia](#).
- Użyj aby wyświetlić wyniki pomiarów dla pacjenta wybranego z listy. Po więcej informacji odnieś się do [Przeglądanie wyników pomiarów pacjentów](#).

Wykonywanie pomiarów


Rozpoczynanie pomiaru

Na ekranie [Dodawania pacjenta](#), rozpocznij, wybierając pomiar dla nowego pacjenta.

Dla zarejestrowanego pacjenta, przejdź do Lista pacjentów> kliknij lewym przyciskiem myszy > menu podręczne> Informacje o pacjencie, kliknij **Zmierz**.

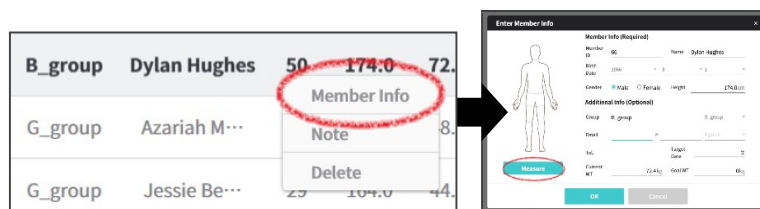


Na ekranie Analiza wyników pomiarów, również dla zarejestrowanych użytkowników, użyj  **Zmierz ponownie**.

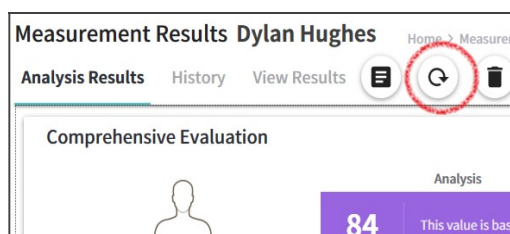

Po rozpoczęciu sesji pomiarowej rozpocznij pomiar zgodnie z instrukcjami głosowymi z urządzenia.

Po zakończeniu pomiaru, kliknij **Pokaż wyniki**, aby sprawdzić wyniki pomiaru.

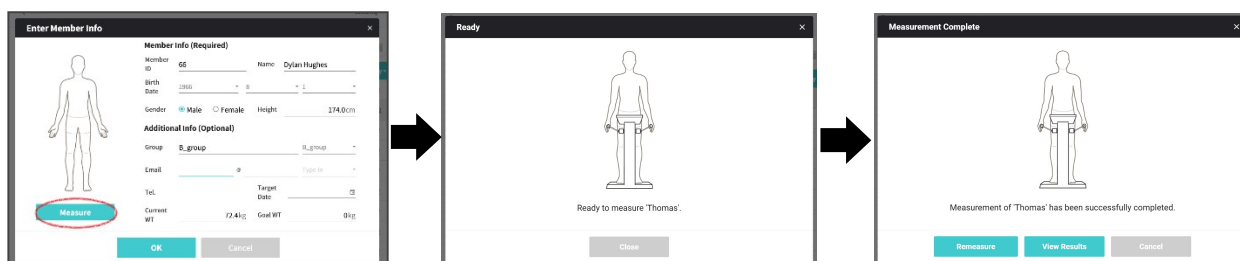

Pomiar ciągły

Możesz zmierzyć wielu pacjentów po kolei.


Wybierz z listy pacjentów, których chcesz kolejno zmierzyć.

Możesz wybrać wszystkich pacjentów klikając pole wyboru  na pasku tytułowym **Lista pacjentów**.

W prawym dolnym rogu ekranu kliknij ikonę Pomiar ciągły .

Postępuj zgodnie z instrukcjami głosowymi, aby rozpocząć pomiary.


Member ID	Group	Name	Age	Height	Weight	Note	Last Activity*
11	G_group	Azariah Mu...	33	158.0	48.5	✓	2016.08.02
110	G_group	Jessie Becker	29	164.0	44.5	✓	2016.08.02
22	G_group	Dakota Doyle	35	160.0	48.4	✓	2016.08.02
33	B_group	Frankie Mut...	29	163.0	47.6	✓	2016.08.02
55	G_group	Reese Wright	35	170.0	57.1	✓	2016.08.02
77	B_group	Jayden Wood	28	178.0	66.1	✓	2016.08.02
88	G_group	Payton Fisc...	17	181.0	68.8	✓	2016.08.02
99	B_group	Micah Laine	30	186.0	71.4	✓	2016.03.17

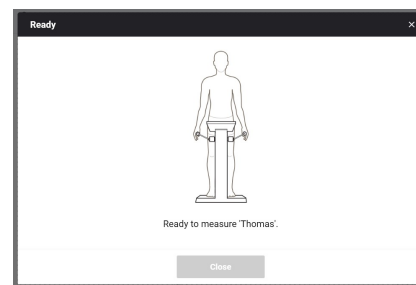


Wyświetlanie wyników pomiarów pacjentów

Przeglądanie wykresów trendów

Wybierz strzałkę w dół po prawej stronie [Listy pacjentów](#), aby wyświetlić wykres trendów.

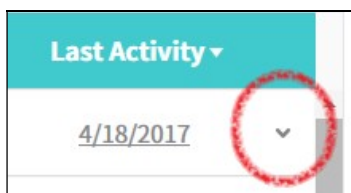


Na wykresie trendów, kliknij poziomą strzałkę, aby wyświetlić wykresy przedstawiające zmierzone dane dotyczące masy ciała, masy tkanki tłuszczowej i masy mięśniowej.

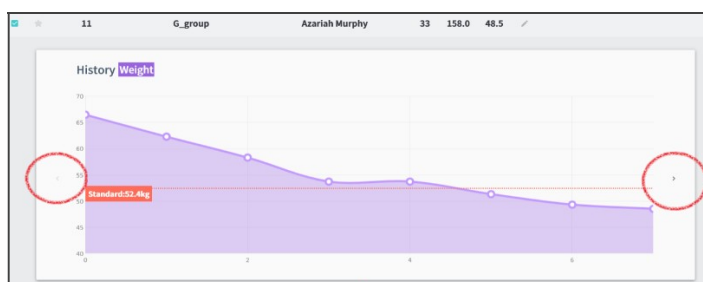

Na ekranie dodawania pacjenta, ustaw docelową masę ciała i datę. Dane zostaną wyświetlone po prawej stronie wykresu zbiorczego.

W oparciu o docelową masę i wysokość ciała, zostaną automatycznie obliczone i wyświetlone odpowiednie wartości dla masy tkanki tłuszczowej i masy mięśniowej.

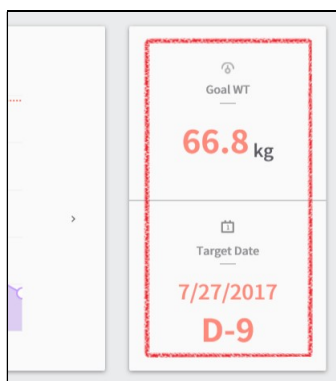

Dla dzieci poniżej 18 roku życia, możesz wyświetlić wykresy dla wysokości i masy ciała.


Przeglądanie szczegółów wyników pomiarów

Na [Liście pacjentów](#), wybierz pożądanego pacjenta, a następnie przejdź do szczegółów. Zaznacz także pole wyboru ☒ pożądanego pacjenta> wybierz [Wyniki pomiaru](#) .

W zakładce [Informacje o pacjencie](#), możesz wyświetlić zarejestrowane informacje o wybranym pacjencie, takie jak: ID, data urodzenia, informacje kontaktowe, itd.

W zakładce [Aktywność](#), możesz wyświetlić szczegóły pomiaru wybranego pacjenta. Jeśli wybierzesz element w

szczegółach, szczegóły pomiaru dla danej daty zostaną wyświetlone po prawej stronie.

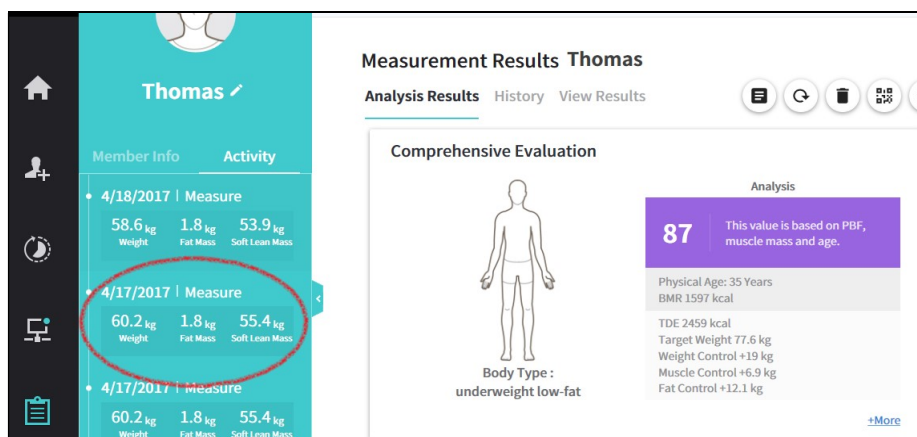


Wynik analizy dostarcza różne wyniki analizy, w tym kompleksową ocenę: masy mięśni, masy tkanki tłuszczowej, stopnia otyłości, składu ciała, tkanki tłuszczowej w jamie brzusznej i stosunku płynów wewnątrzkomórkowych do pozakomórkowych. (Dostarczane są różne wyniki analizy, w zależności od obsługiwanego urządzenia).

Wykres trendów umożliwia użytkownikom przeglądanie informacji o pacjencie: składu ciała, masy ciała, masy mięśniowej i stosunku tkanki tłuszczowej w okresie 3/ 6/ 12 miesięcy.

Podgląd arkuszy wyników pozwala uzyskać podgląd wyniku pomiaru tkanki tłuszczowej przed wydrukowaniem.

Dla dzieci w wieku poniżej 18 lat, wyniki dotyczące wysokości i masy ciała są wyświetlane na wykresie.

Zarządzanie wynikami pomiarów

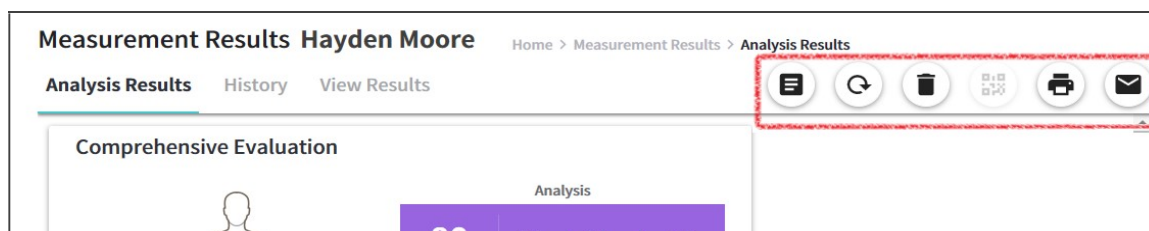

 Reprezentuje funkcję MEMO. Możesz stworzyć notatkę z informacjami o pacjencie.

Kliknij , aby zmierzyć ponownie. Wybierz tę ikonę, aby rozpocząć pomiar składu ciała.

Kliknij , aby usunąć wyniki pomiarów na bieżącym ekranie.

 Reprezentuje ekran skanowania kodu QR. Pacjenci mogą używać swoich smartfonów do skanowania kodu QR, aby sprawdzić wyniki pomiarów na swoich smartfonach.

Kliknij , aby wydrukować raport. Komputer musi być podłączony do drukarki.

Kliknij , aby wysłać wynik pomiaru i informacje o pacjencie za pomocą e-maila. (MS Outlook musi być zainstalowany na komputerze.)

Zarządzanie pacjentami

Dodawanie pacjentów

Na ekranie głównym, kliknij ikonę Dodaj pacjenta , aby wprowadzić informacje o pacjencie.


Na ekranie dodawania pacjenta, kliknij przycisk **Zmierz**, aby rozpocząć pomiar składu ciała pacjenta.

Kliknij przycisk **Wprowadź następnego pacjenta**, aby dodać kolejnego pacjenta.

Przeglądanie informacji o pacjencie i dodawanie notatek

Kliknij prawym przyciskiem myszy listę pacjentów, aby wyświetlić menu: Sprawdź informacje o pacjencie, Dodaj notatkę i Usuń pacjenta.

Możesz tworzyć proste notatki o pacjentach i je przeglądać.

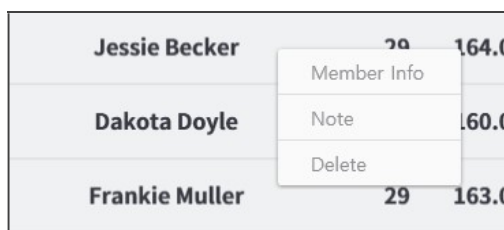


A screenshot of a patient list table. The table has columns for Name, Age, Height, and Weight. The first three rows are visible: Jessie Becker (Age 29, Height 164.0), Dakota Doyle (Age 29, Height 160.0), and Frankie Muller (Age 29, Height 163.0). A right-click context menu is open over the first row, showing options: Member Info, Note, and Delete.

Name	Age	Height	Weight
Jessie Becker	29	164.0	
Dakota Doyle	29	160.0	
Frankie Muller	29	163.0	

Sortowanie listy pacjentów

Wybierz pozycję w kolumnie tytułowej na liście pacjentów, aby ją posortować.

- Wybierając ID pacjenta, nazwę grupy, imię, wiek, płeć i ostatnią aktywność, możesz sortować elementy w porządku rosnącym lub malejącym.

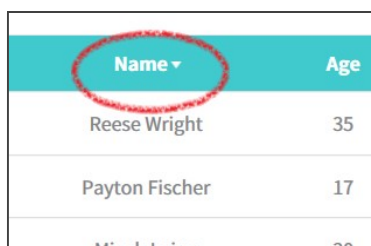

A screenshot of a patient list table. The header row has 'Name' and 'Age' columns. The 'Name' column is circled in red. The first three rows are visible: Reese Wright (Age 35), Payton Fischer (Age 17), and Micah Laine (Age 20).

Name	Age
Reese Wright	35
Payton Fischer	17
Micah Laine	20

Zarządzanie informacjami o pacjencie/ Eksport

Wybierz pacjenta, zaznaczając pole wyboru na liście pacjentów na ekranie głównym.

- Wybierz wszystkich: zaznacz pole wyboru po prawej stronie wiersza tytułu, aby wybrać wszystkich pacjentów.



A screenshot of a 'Member List' table. The table has columns: Member ID, Group, Name, Age, Height, Weight, Note, and Last Activity. The first four rows are visible. A selection icon (a square with a checkmark) is highlighted in the first row. The 'Last Activity' column has a dropdown arrow.

Member ID	Group	Name	Age	Height	Weight	Note	Last Activity
44	B_group	Hayden Moore	40	168.0	72.3		2016.08.22
66	B_group	Dylan Hughes	50	174.0	72.4		2016.08.22
11	G_group	Azariah Murphy	33	158.0	48.5		2016.08.02
110	G_group	Jessie Becker	29	164.0	44.5		2016.08.02

- Wybierz jednego: aby wybrać pacjenta, zaznacz pole wyboru obok nazwy pacjenta.

Member List								
	Member ID	Group	Name	Age	Height	Weight	Note	Last Activity
☒	44	B_group	Hayden Moore	40	168.0	72.3		2016.08.22
☐	66	B_group	Dylan Hughes	50	174.0	72.4		2016.08.22

Kliknij , aby zmodyfikować wybrane informacje o pacjencie (tylko przy wyborze jednego pacjenta).

Kliknij , aby usunąć informacje o wybranym pacjencie.

Kliknij , aby zapisać listę aktualnie wybranych pacjentów na komputerze. (Eksportuj). Wybierz żądany folder i zapisz plik pod nazwą MembersList.xls w folderze.

– Eksportuj listę wszystkich pacjentów: gdy zaznaczona jest cała lista pacjentów lub gdy klikniesz , gdy pole wyboru „Wybierz wszystkich” jest odznaczone, możesz zapisać listę jako plik Excel.

– Eksportuj część pacjentów z listy: po wybraniu pacjentów z listy pacjentów wybierz ikonę , aby zapisać wybraną listę pacjentów jako plik Excel.

– Wyeksportowanie listy pacjentów umożliwia użytkownikom zapisywanie elementów aktualnie wybranej listy pacjentów jako pliku Excel. Aby zmienić pozycje do wyeksportowania, wybierz

[Ustawienia>Zdefiniowana lista pacjentów.](#)

Wyszukiwanie pacjentów


Możesz wyszukiwać pacjentów według nazwy, nazwy grupy i ID.

d					
Search Results 4 result(s)					
☐	Member ID	Group	Name	Age	H
☐	44	B_group	Hayden Moore	40	1
☐	66	B_group	Dylan Hughes	50	1
☐	22	G_group	Dakota Doyle	35	1
☐	77	B_group	Jayden Wood	28	1

Zarządzanie kontem centrum

Zarządzanie kontem centrum

Wybierz **Nazwa centrum>Informacje o centrum** w prawym górnym rogu ekranu głównego.

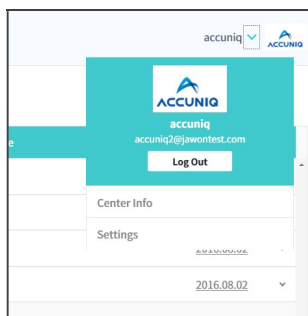

Na ekranie „Informacji o centrum” możesz wprowadzić nowe hasło, nazwę centrum, adres centrum, numer telefonu, adres e-mail i logo.

Nie można zmienić ID.

Adres e-mail można przełączyć na inny adres e-mail, którego używasz. Twój adres e-mail może zostać wykorzystany do odzyskania zapomnianego ID lub hasła centrum. Upewnij się, że podałeś prawidłowy adres e-mail.

Aby uzyskać logo informacyjne centrum, wybierz plik JPG, JPEG, PNG, BMP lub GIF nie większy niż 296x70.

Nie możesz wycofać konta centralnego w ramach tego programu. Jeśli usuniesz program, dane konta i informacje o pacjencie zostaną automatycznie usunięte.

Logowanie do centrum

Możesz zalogować się za pomocą ID i hasła podanego podczas rejestracji.

Zaznacz pole wyboru **Pamiętaj mnie**, aby korzystać z systemu natychmiast po uruchomieniu, bez konieczności logowania się.

Aby się wylogować, wybierz **Nazwa centrum>Wyloguj** w prawym górnym rogu ekranu. Powrócisz do ekranu logowania.

Wyszukiwanie ID konta centrum

U dołu ekranu logowania, wybierz **Znajdź ID**.

Wprowadź zarejestrowaną nazwę centrum i adres e-mail, aby znaleźć ID.

Wyszukiwanie hasła konta centrum

U dołu ekranu logowania, wybierz **Znajdź hasło**.



Po wprowadzeniu identyfikatora logowania i zarejestrowanego adresu e-mail, tymczasowe hasło zostanie wysłane na zarejestrowany adres e-mail.

Wpisz hasło tymczasowe wysłane na adres e-mail, aby się zalogować.

Po zalogowaniu, hasło należy zmienić za pomocą menu [Informacje o centrum](#) u góry ekranu.



Ustawienia

Wybierz **Nazwa centrum > Ustawienia** w prawym górnym rogu ekranu głównego, aby zarządzać ustawieniami.

Język i lokalizacja

Możesz zmienić wyświetlany język, a także jednostki dla masy i wysokości ciała i ciśnienia krwi. Po zmianie, proszę kliknąć przycisk **Zatwierdź**.



Language and Locale

Language | English

Unit | ☒ kg/cm ☐ lb/ft in


Blood Pressure | ☒ WHO ☐ JNC7

Apply

Zdefiniowana lista pacjentów

Możesz ukryć lub wyświetlić niektóre informacje, wyświetlane na liście pacjentów na ekranie głównym.

Po wybraniu informacji do dodania do listy pacjentów po lewej stronie, przesun ją w prawo, klikając .

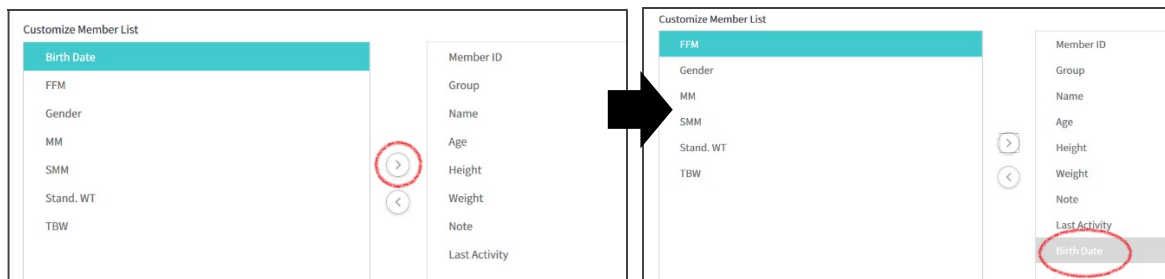

Jeśli chcesz usunąć informacje z listy pacjentów, wybierz je po prawej stronie i przesun w lewo klikając .

Po zakończeniu ustawień, kliknij przycisk **Zatwierdź**, aby zapisać zmiany.

Podłączanie urządzenia

Pokaż listę urządzeń połączonych przez USB lub Bluetooth.

Wybierz urządzenie, które chcesz połączyć.


Po nawiązaniu połączenia,

Połączenie urządzenia

Pokaż listę urządzeń połączonych przez USB lub Bluetooth.

Połącz USB i komputer za pomocą kabla USB. Po nawiązaniu połączenia, ikona połączenia z urządzeniem zmieni się na .

Aby połączyć się przez Bluetooth, włącz Bluetooth. Następnie urządzenie wyświetla listę urządzeń połączonych przez USB lub Bluetooth.

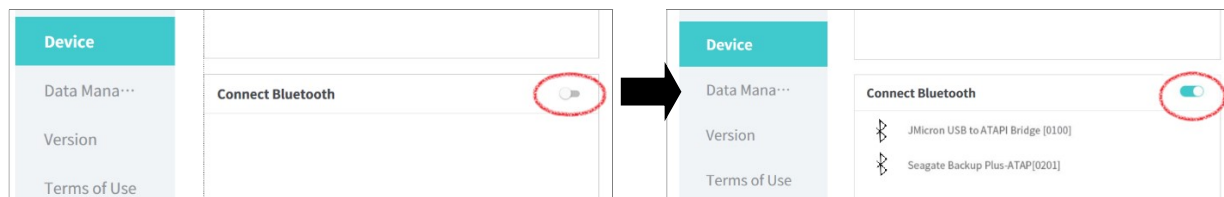

Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć. Po nawiązaniu połączenia ikona połączenia z urządzeniem zmieni się na .

Połączenie Bluetooth

Uwaga



Sposób połączenia z laptopem może się różnić w zależności od specyfikacji Bluetooth.

W zależności od specyfikacji Bluetooth laptopa, może on nie być w stanie prawidłowo połączyć się z urządzeniem.

Wyposaż analizator w urządzenie Bluetooth i włącz analizator.

Wybierz **Bluetooth** w ustawieniach analizatora.

(Jeśli połączenie Bluetooth zostało wykonane przy włączonym analizatorze, wyłącz go i włącz ponownie.)

Na ekranie głównym ACCUNIQ Manager, wybierz **urządzenie** i włącz  Połącz z Bluetooth.


Po wyszukaniu ACCUNIQ BC380 pojawi się następujący obraz:  | ACCUNIQ BC380

Po kliknięciu ACCUNIQ BC380, zostanie nawiązane połączenie i ikona czerwonej kropki po prawej stronie monitora zmieni się na niebieską, jeśli połączenie zakończy się pomyślnie. Zobacz zdjęcie poniżej.

(W przypadku błędu połączenia Bluetooth, proszę powtórzyć kroki).

Wbudowany moduł Bluetooth w komputerze musi być obsługiwany przez profil portu szeregowego (SPP).

ACCUNIQ Manager łączy się automatycznie z BCA bez pytania o podanie kodu PIN. Jeśli pojawi się monit o wprowadzenie kodu PIN, numer to "1234".

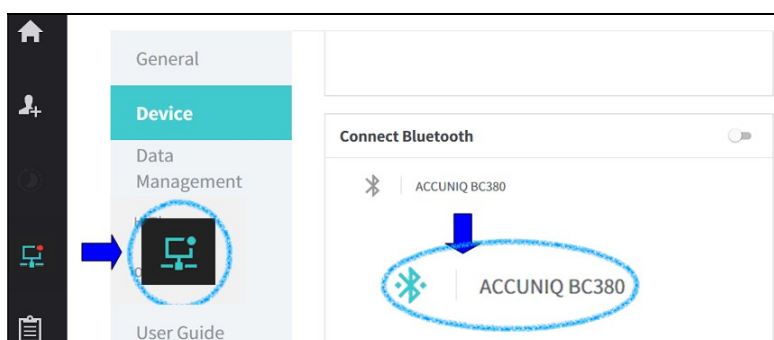

Połączenie Bluetooth (Manualne)


Note




Jeśli nie możesz połączyć Bluetooth wg powyższej instrukcji, spróbuj połączyć się ręcznie.

Włącz analizator i sprawdź połączenie Bluetooth.

Uruchom urządzenie Bluetooth na komputerze.

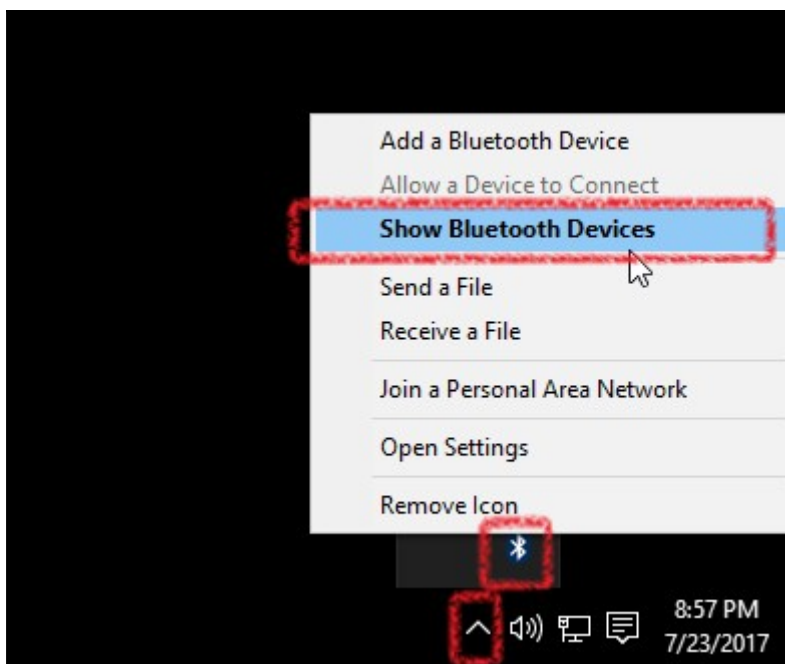

Kliknij "Pokaż urządzenia Bluetooth" jak pokazano na obrazku powyżej.

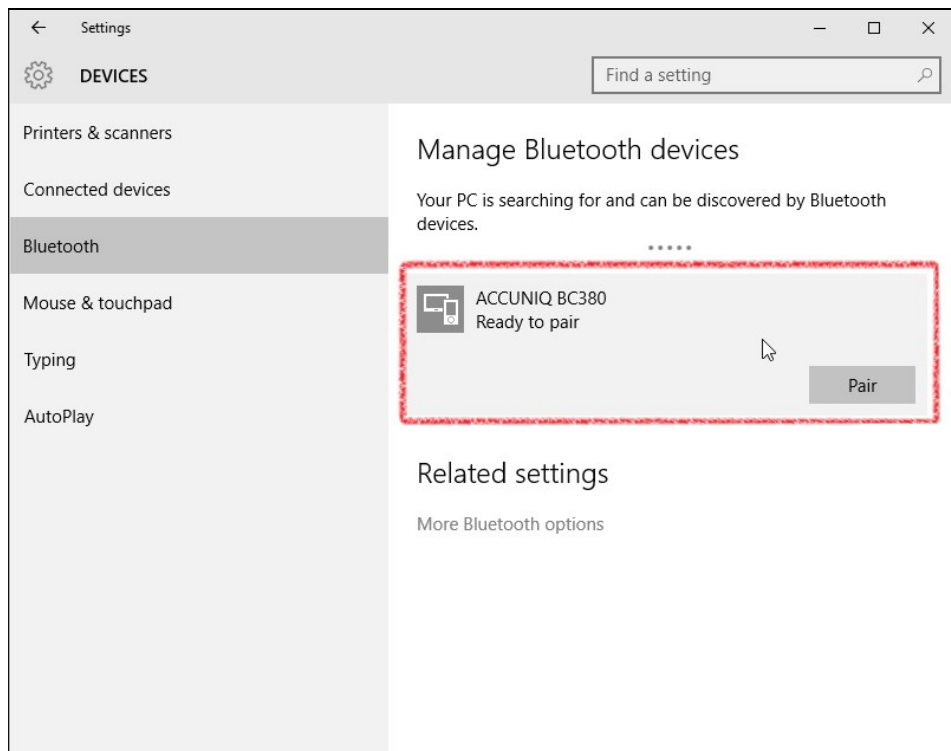


Note




Nazwa Bluetooth ma formę "ACCUNIQ BC____"

Wybierz ACCUNIQ BC380 i kliknij "Paruj".

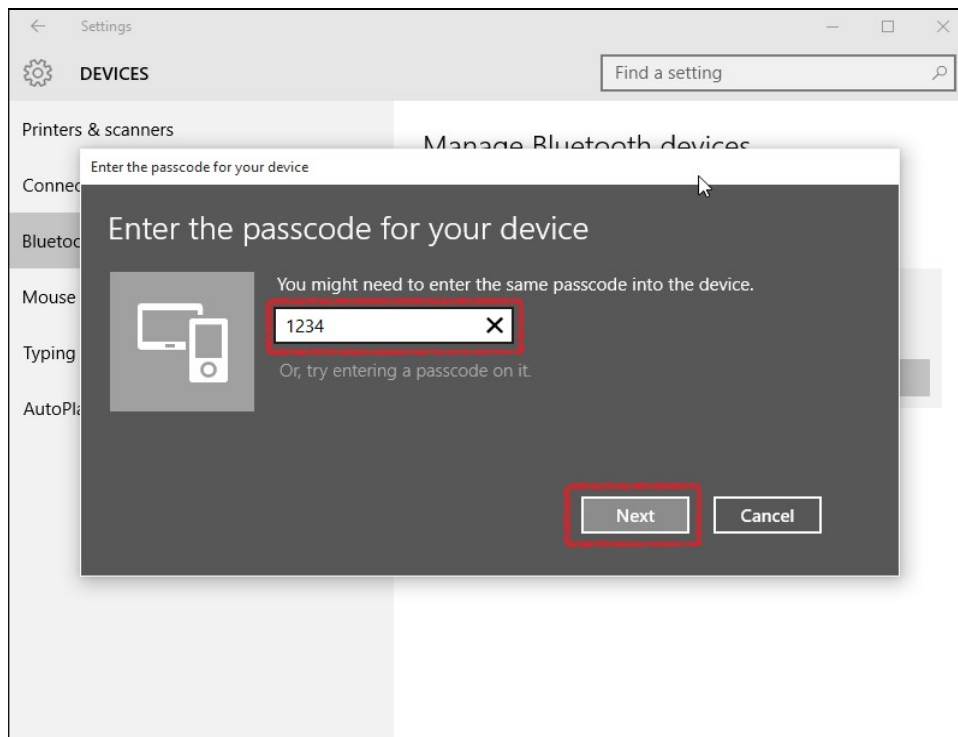

Wprowadź "1234" i kliknij "dalej".

Jeśli połączenie zostanie pomyślnie nawiązane, status urządzenia zmieni się na "Połączono".

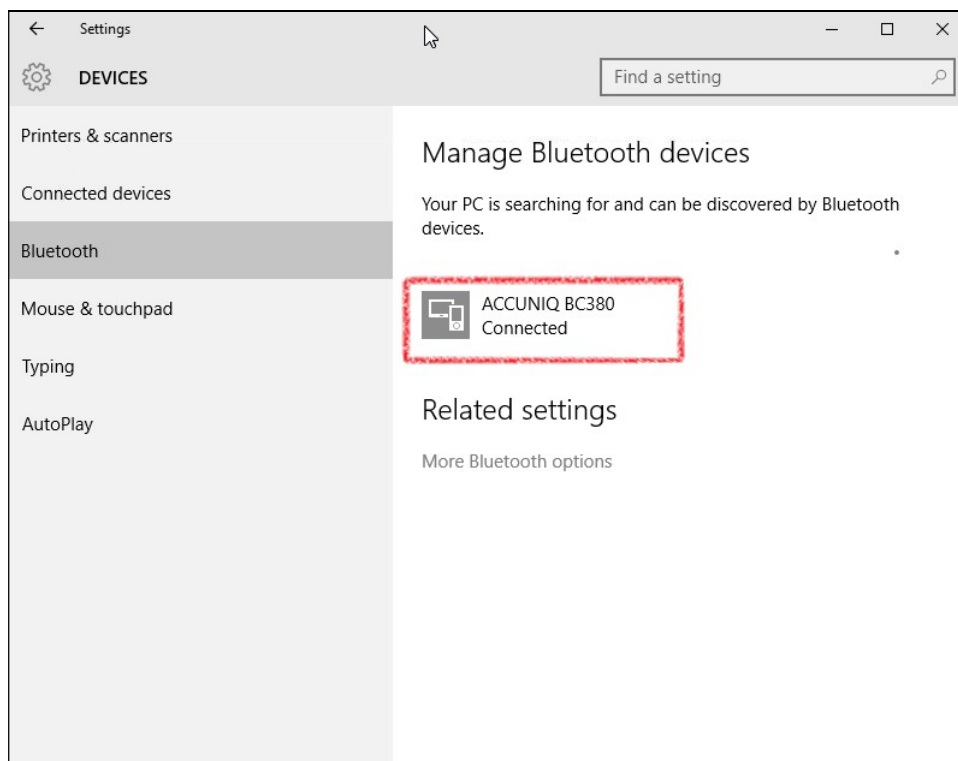


Zobacz "Połączenie Bluetooth" i połącz się z analizatorem za pomocą ACCUNIQ Manager.

Zarządzanie danymi

Możesz zapisać dane pomiarowe na pulpicie.

Wybierz ścieżkę > Wybierz lokalizację wykonania kopii zapasowej > **Wybierz kopię zapasową**, aby utworzyć plik kopii zapasowych.

Opcja automatycznej kopii zapasowej tworzy pliki kopii zapasowych regularnie- codziennie, lub co 3/ 7/ 14/ 30 dni.

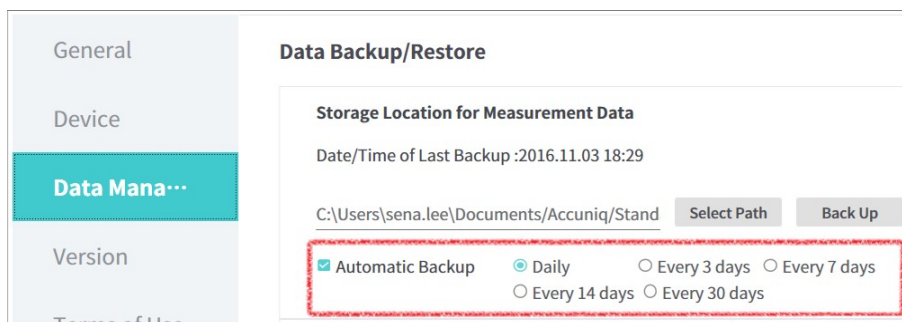

Aby przywrócić plik kopii zapasowej do programu, **Wybierz ścieżkę** > wybierz plik do przywrócenia > **Przywróć**.




Możesz mieć wiele kopii zapasowych plików danych. Wybierz pierwszy plik i przywróć; przywrócisz wszystkie dane.

Podczas przywracania danych zostanie wykonana automatyczna kopia zapasowa istniejących danych.

Możesz importować pliki z danymi. Ustawienia>Zarządzanie danymi>Znajdź plik>Otwórz

Możesz importować następujące pliki danych: CONTACT Plus, CONTACT (*.cont) , BodyPass (*.bp) , lista pacjentów (*.xls)

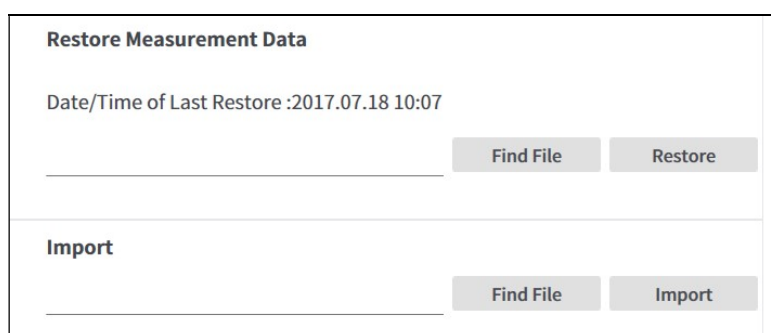

Jak utworzyć plik z listą pacjentów(*.xls)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	USERID1	User Name	2	6/7/1982	187.6	88.5	2	123-456-7890	info@accunig.com
2	USERID2	User Name	2	12/25/1972	152	66.4	2	010-245-7890	user1@accunig.com
3	USERID3	User Name	2	8/9/1960	149.2	32.2	1	010-345-8520	user2@accunig.com
4									
5									
6									
7									
8									

	Wymagania	Komentarz szczegółowy
ID pacjenta	*	ID (Maksymalnie 20 znaków)
Nazwa pacjenta	*	Nazwa pacjenta
Płeć	*	Mężczyzna: 1 / Kobieta : 2
Data urodzenia	*	np.) format 1975-08-05
Wysokość ciała	*	np.) format 153.2
Masa ciała		np.) format 76.2
Aktywność		"2" ==> regularna aktywność
		0: relaks: leżenie lub brak ruchu.(spoczynek))
		1: lekka aktywność: mniej niż 2h chodzenia. (pracownicy biurowi))
		2 : regularna aktywność: mniej niż 4h chodzenia.
		3 : ciężka aktywność: więcej niż 4h chodzenia. (rolnicy)
		4 : ekstremalna aktywność: aktywne wykorzystywanie każdego mięśnia w ciele. (atleci)
Numer telefonu		np.) 010-1234-5678
E-mail		np.) Info_accunig@selvashc.com

Wersja

Możesz sprawdzić aktualną wersję ACCUNIQ MANAGER.

Aktualizacje są wymagane, aby zachować najnowszą wersję. (Połączenie internetowe jest wymagane do aktualizacji.)

Informacje dodatkowe

Jeśli masz problem ze swoim ACCUNIQ MANAGER lub jeśli masz zapytanie kliniczne, skontaktuj się z nami.

Siedziba (centrum badawczo-rozwojowe)
155, Sinseong-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34109, Rep. of KOREA
Tel. +82-42-864-4460 Fax. +82-42-864-4462

Biuro (Centrum sprzedaży)
20F Daerung Techno Town 18, 19, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 08594, Korea)
Tel. +82-2-587-4056 Fax. +82-2-588-1937

www: <https://accuniq.com/>
E-mail: Info_accuniq@selvashc.com

Zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich, żadna część instrukcji ACCUNIQ MANAGER nie może być nielegalnie kopiowana, powielana, tłumaczona lub przekształcana na inne formy bez pisemnej zgody SELVAS Healthcare. Instrukcja użytkownika może ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma SELVAS Healthcare nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane nieprzestrzeganiem pozycji zawartych w niniejszej instrukcji.

