




BC310. Problem z aktualizacją programu CONTACT

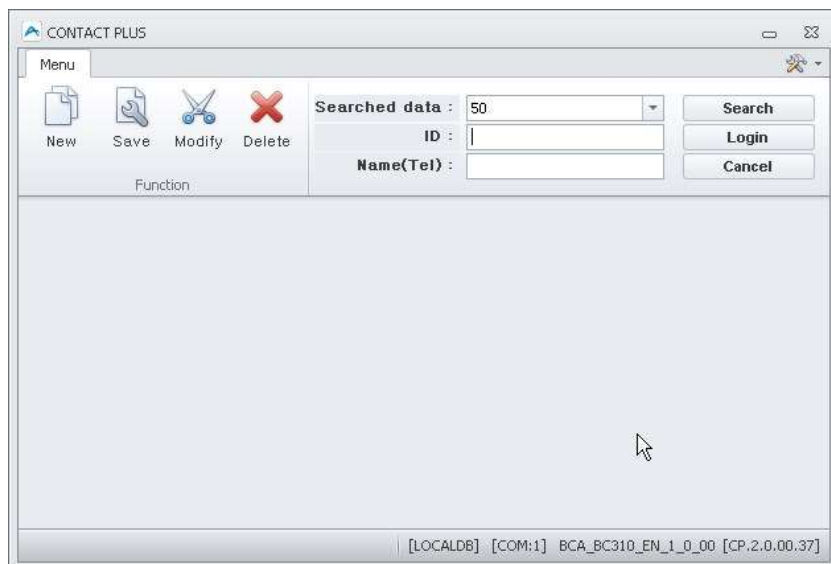

Program CONTACT PLUS posiada opcję aktualizacji. Informacja o wersji aktualizacji znajduje się w prawym dolnym rogu. W tym przypadku mamy wersję [CP.2.0.00.37]

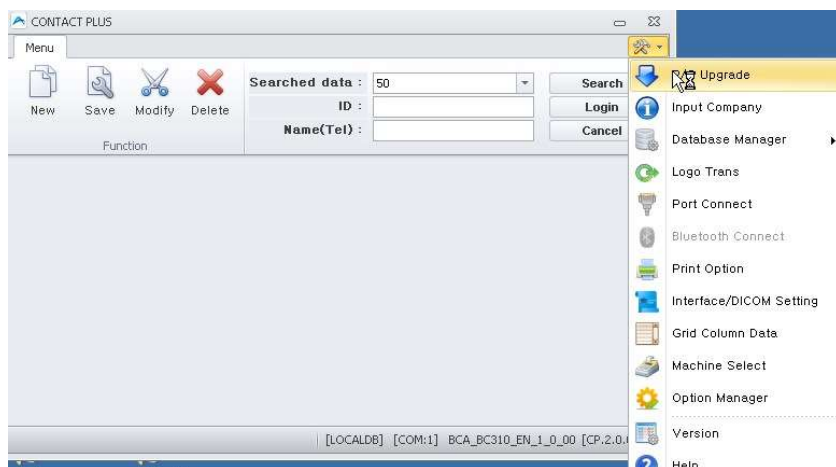


Aby zaktualizować program do najnowszej wersji klikamy w przycisk w prawym górnym rogu „Narzędzia” i wybieramy pierwszą opcję „P/G Upgrade”.

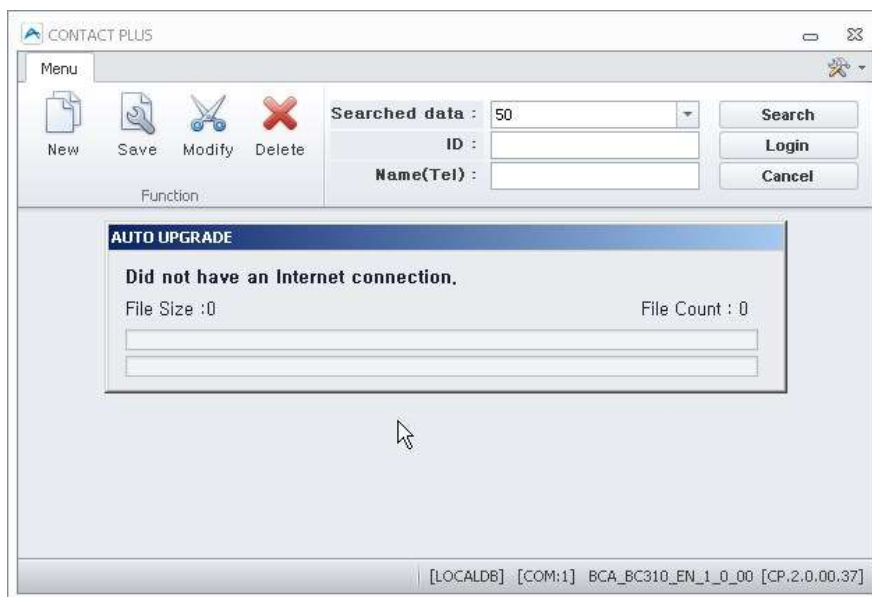


Przy poprawnych ustawieniach powinno się ukazać okienko w którym następuje pobieranie wymaganych plików.

Może się zdarzyć że podczas aktualizacji ukaże nam się błąd taki jak na obrazku obok. Musimy zmodyfikować ręcznie plik ustawień.

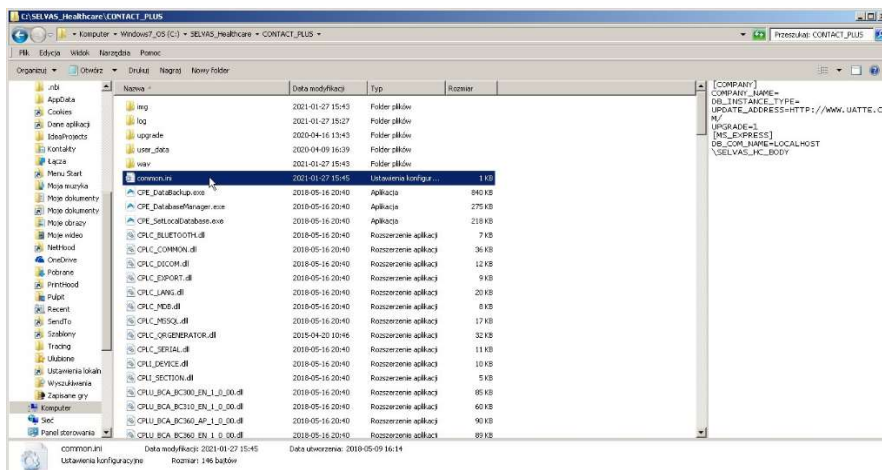

Musimy dostać się do folderu w którym jest zainstalowany program CONTACT. Odnaleźć plik „common.ini” i otworzyć go w programie Notepad (notatnik).


Standardowo plik powinien się znaleźć w katalogu „C:\SELVAS_Healthcare\CONTACT_PLUS

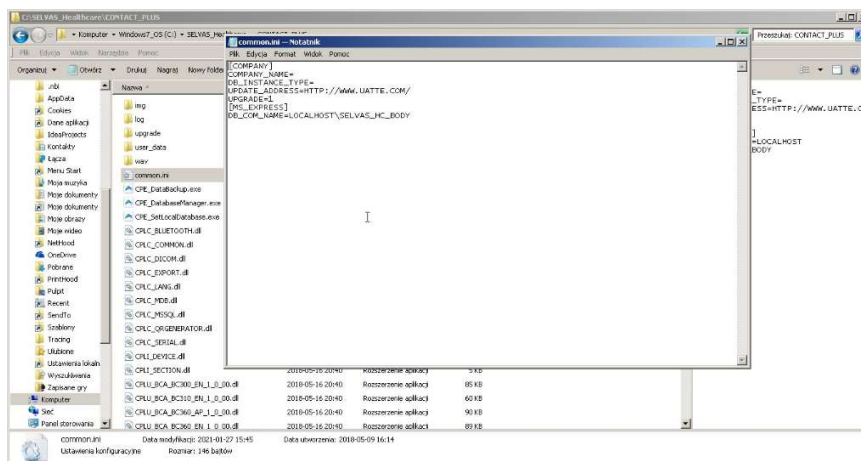


Znajdujemy wpis:
UPDATE_ADDRESS=
HTTP://WWW.UATE.COM

Zamieniamy sam adres po UPDATE_ADDRESS na ten wpis:
https://www.accuniq.com/download/pc_manager/

Zapisujemy plik i zamykamy. Uruchamiamy ponownie program CONTACT PLUS i ponownie próbujemy zrobić aktualizację.

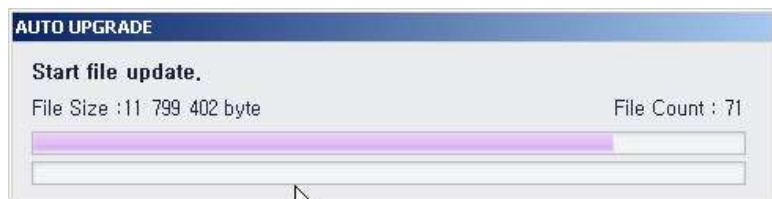

Teraz już bez problemu aplikacja aktualizuje się do najnowszej wersji. Po skończeniu aplikacja sama się wyłączy. Po ponownym włączeniu możemy sprawdzić że aktualizacja się udała.

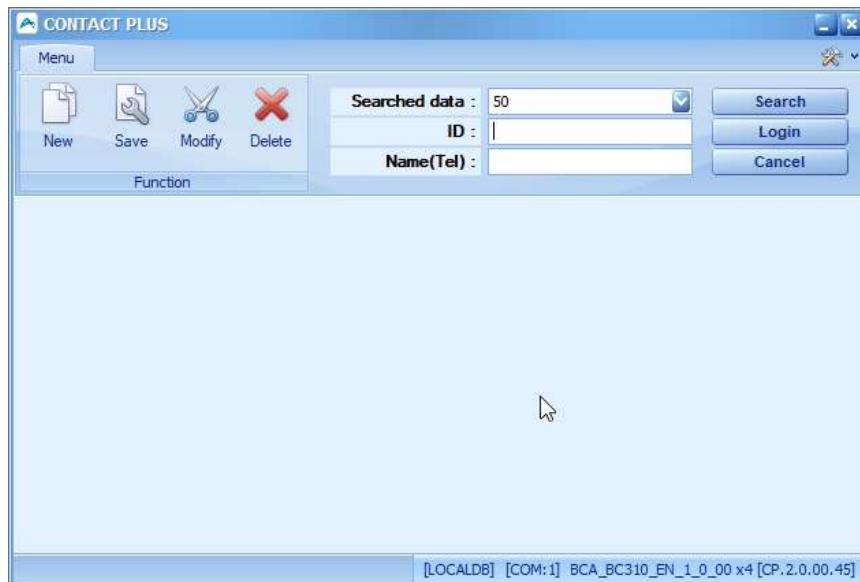

Posiadamy najnowsze oprogramowanie w wersji [CP.2.0.00.45]