




BC310. JAK USTAWIĆ AUTOMATYCZNY CODZIENNY BACKUP BAZY DANYCH PACJENTÓW I ICH BADAŃ.

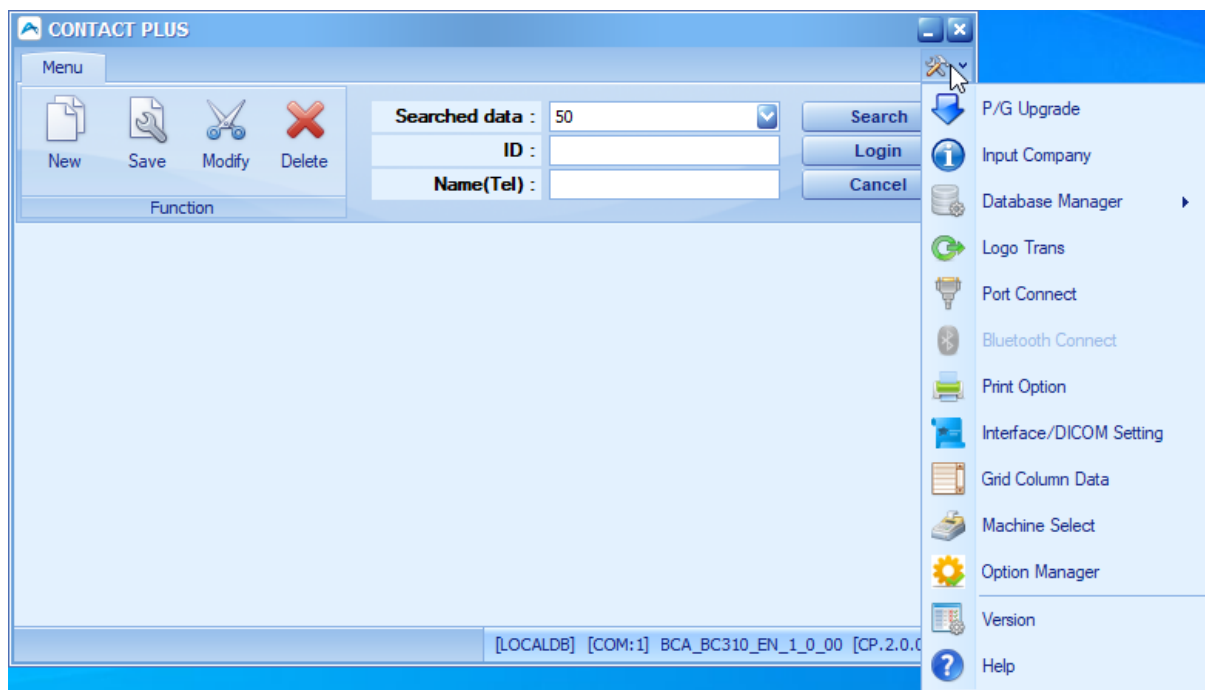


1. Na głównym ekranie aplikacji odnajdujemy małą ikonkę narzędzi w prawym górnym rogu. Klikamy ją i w rozwijanym menu klikamy Database Manager.

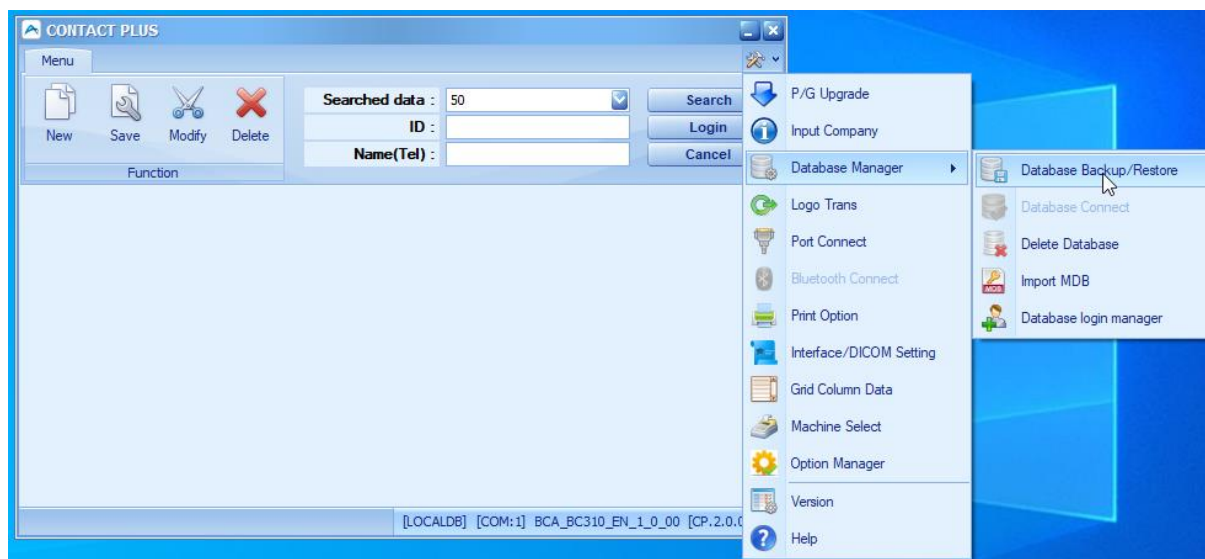

2. Dalej naciskamy Database Backup/Restore.

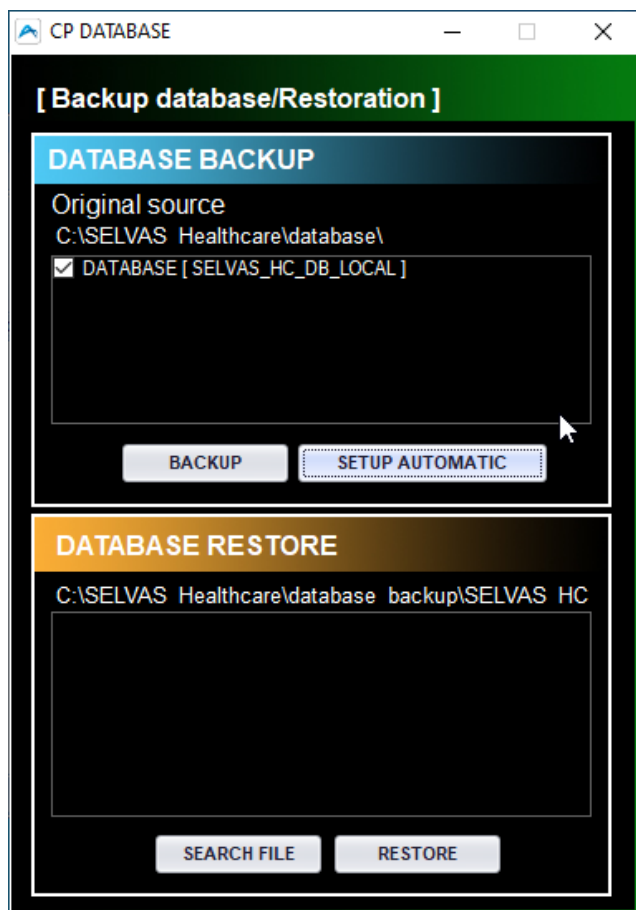

3. Otworzyło się okienko do ustawień bazy danych. Klikamy SETUP AUTOMATIC.

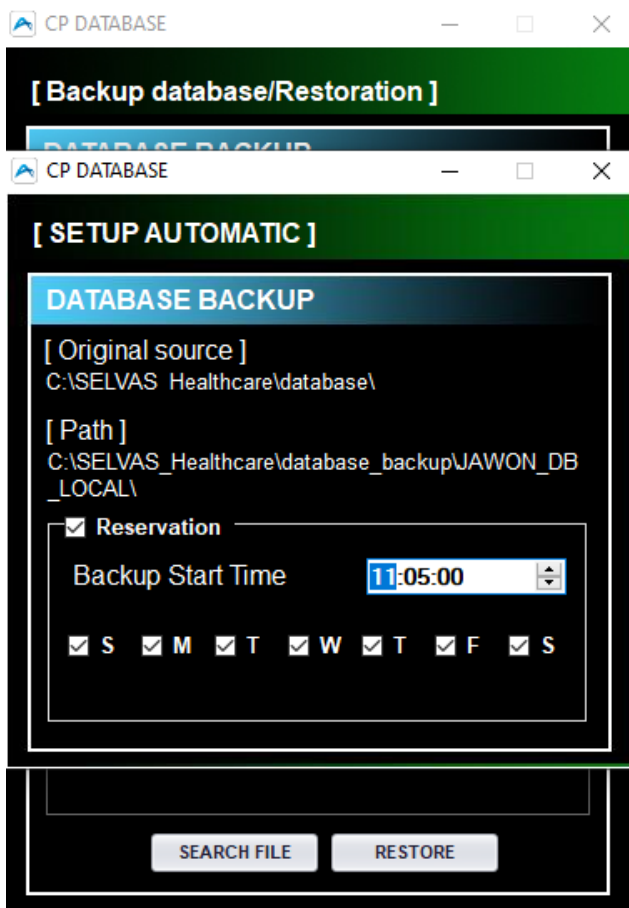

4. Otwiera się nowe okienko w którym mamy dostęp do ustawień. Zaznaczamy kwadracik RESERVATION oraz poniżej w kwadracikach dni kiedy ma być przeprowadzona archiwizacja danych. W sekcji BACKUP START TIME wybieramy sobie godzinę o której ma nastąpić archiwizacja. Najlepiej ustawić taki czas kiedy wiemy że na pewno mamy komputer włączony. Po ustawieniu zamykamy okienko od archiwizacji. Od teraz w dniach zaznaczonych i o ustawionej godzinie nastąpi archiwizacja danych pacjentów i ich badań. Nie musi być włączony w tym czasie program CONTACT. Wystarczy uruchomiony sam komputer.