



BC310. Eksportowanie danych pacjentów do pliku Excel.

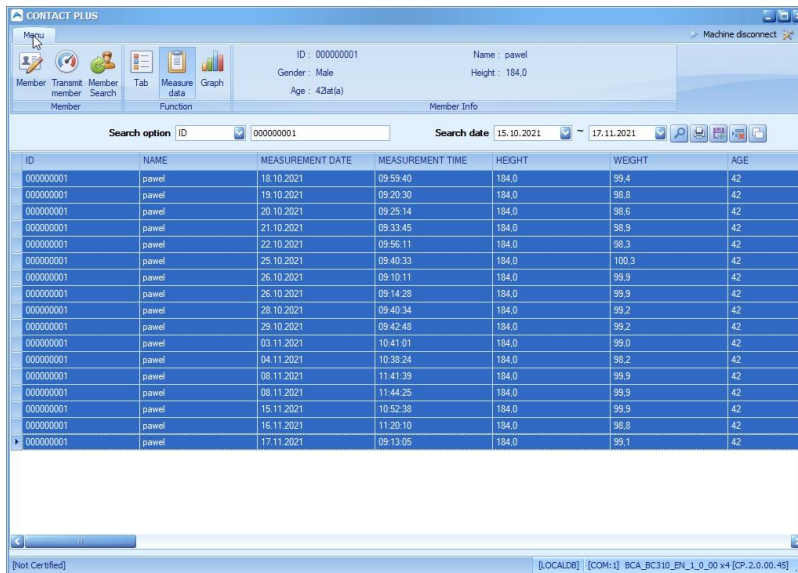

The screenshot shows the CONTACT PLUS software interface. At the top, there is a menu bar with options: Member, Transmit member, Member Search, Tab, Measure data, and Graph. Below the menu bar, there is a patient information section with fields for ID (000000001), Name (pawel), Gender (Male), Age (42lat(a)), Height (184.0), and Member Info. A search bar is present with 'Search option' set to ID and 'Search date' set to 15.10.2021. The main area displays a table of patient measurements.

ID	NAME	MEASUREMENT DATE	MEASUREMENT TIME	HEIGHT	WEIGHT	AGE
000000001	pawel	18.10.2021	09:59:40	184.0	99.4	42
000000001	pawel	19.10.2021	09:20:30	184.0	98.8	42
000000001	pawel	20.10.2021	09:25:14	184.0	98.6	42
000000001	pawel	21.10.2021	09:33:45	184.0	98.9	42
000000001	pawel	22.10.2021	09:56:11	184.0	98.3	42
000000001	pawel	25.10.2021	09:40:33	184.0	100.3	42
000000001	pawel	26.10.2021	09:10:11	184.0	99.9	42
000000001	pawel	26.10.2021	09:14:28	184.0	99.9	42
000000001	pawel	28.10.2021	09:40:34	184.0	99.2	42
000000001	pawel	29.10.2021	09:42:48	184.0	99.2	42
000000001	pawel	03.11.2021	10:41:01	184.0	99.0	42
000000001	pawel	04.11.2021	10:38:24	184.0	98.2	42
000000001	pawel	08.11.2021	11:41:39	184.0	99.9	42
000000001	pawel	08.11.2021	11:44:25	184.0	99.9	42
000000001	pawel	15.11.2021	10:52:38	184.0	99.9	42
000000001	pawel	16.11.2021	11:20:10	184.0	98.8	42
000000001	pawel	17.11.2021	09:13:05	184.0	99.1	42


1. Aby wyeksportować dane pacjenta musimy dostać się na kartotekę naszego pacjenta. Zaznaczamy wszystkie badania (skrót Ctrl + a) lub wybieramy tylko te które nas interesują (zaznaczamy naciskając klawisz Ctrl i lewy klik myszki).

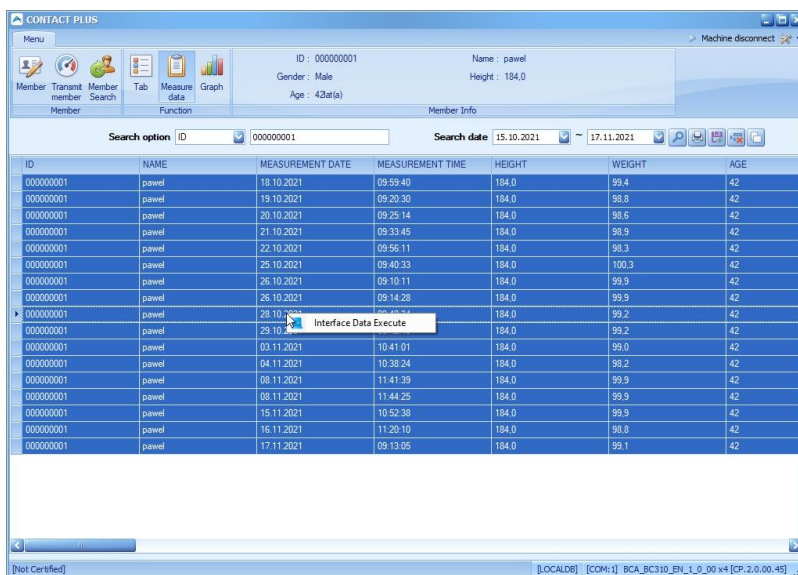


The screenshot shows the CONTACT PLUS software interface with the 'Interface Data Execute' dialog box open. The dialog box has a title bar and a single button labeled 'Interface Data Execute'. The background table of patient measurements is visible but slightly dimmed.

ID	NAME	MEASUREMENT DATE	MEASUREMENT TIME	HEIGHT	WEIGHT	AGE
000000001	pawel	18.10.2021	09:59:40	184.0	99.4	42
000000001	pawel	19.10.2021	09:20:30	184.0	98.8	42
000000001	pawel	20.10.2021	09:25:14	184.0	98.6	42
000000001	pawel	21.10.2021	09:33:45	184.0	98.9	42
000000001	pawel	22.10.2021	09:56:11	184.0	98.3	42
000000001	pawel	25.10.2021	09:40:33	184.0	100.3	42
000000001	pawel	26.10.2021	09:10:11	184.0	99.9	42
000000001	pawel	26.10.2021	09:14:28	184.0	99.9	42
000000001	pawel	28.10.2021	09:40:34	184.0	99.2	42
000000001	pawel	29.10.2021	09:42:48	184.0	99.2	42
000000001	pawel	03.11.2021	10:41:01	184.0	99.0	42
000000001	pawel	04.11.2021	10:38:24	184.0	98.2	42
000000001	pawel	08.11.2021	11:41:39	184.0	99.9	42
000000001	pawel	08.11.2021	11:44:25	184.0	99.9	42
000000001	pawel	15.11.2021	10:52:38	184.0	99.9	42
000000001	pawel	16.11.2021	11:20:10	184.0	98.8	42
000000001	pawel	17.11.2021	09:13:05	184.0	99.1	42


2. Po zaznaczeniu badań które nas interesują naciskamy prawy klik myszy i pojawi nam się okienko „Interface Data Execute”. Naciskamy w ten przycisk.

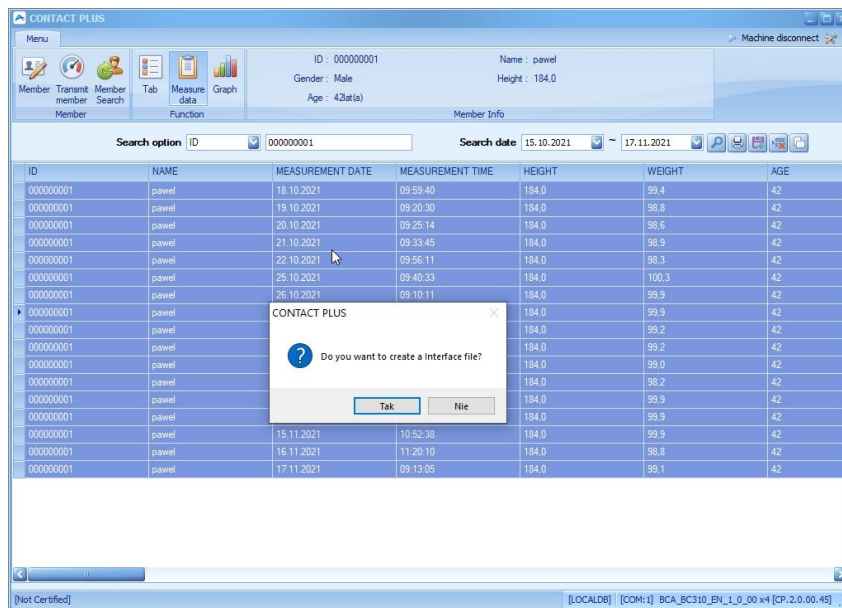


3. Wyświetli się monit o potwierdzenie operacji. Klikamy przycisk TAK.

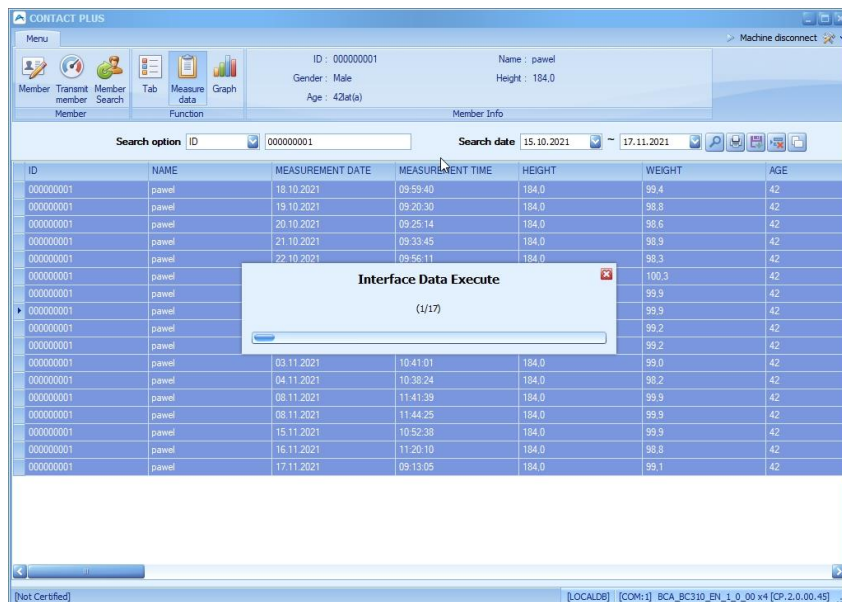


4. Następuje tworzenie pliku wynikowego. W zależności od ilości danych „chwilkę” to może potrwać.

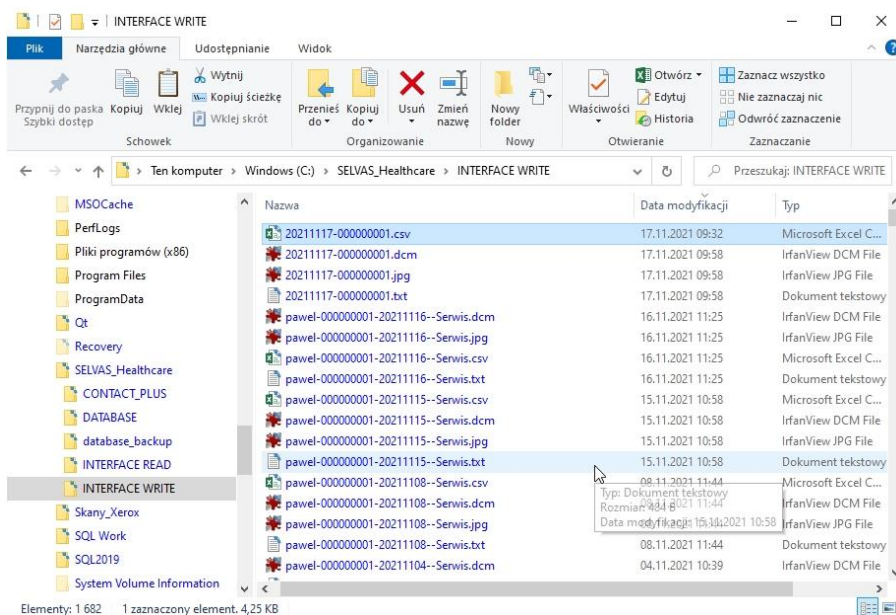


5. Po zakończonej operacji musimy dostać się do katalogu „INTERFACE WRITE”. Jeżeli nic nie było zmieniane przy instalacji to standardowo ten katalog powinien być w C:/SELVAS_Healthcare/.

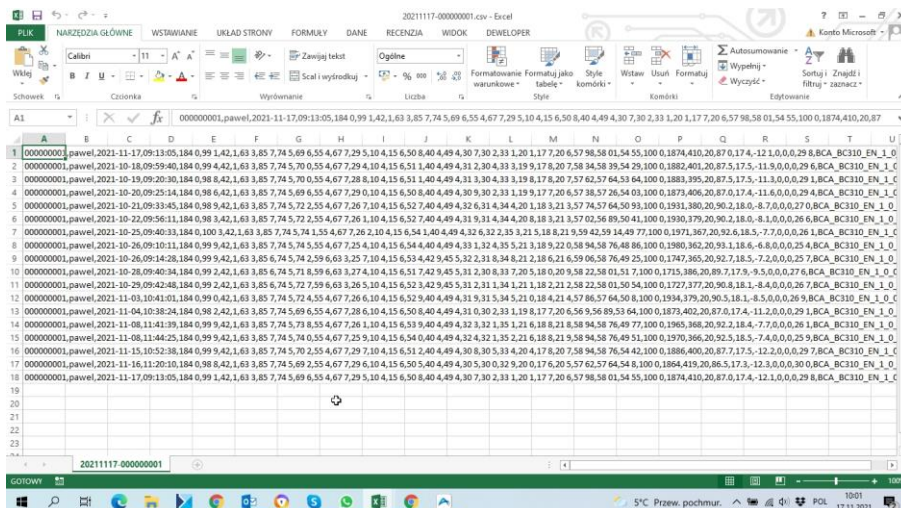

6. Otwieramy plik z rozszerzeniem *.CSV. Tutaj mamy podane wszystkie dane zebrane z aplikacji. W podany powyżej sposób tworzy się nie tylko plik *.CSV ale także plik tekstowy z tymi samymi danymi.

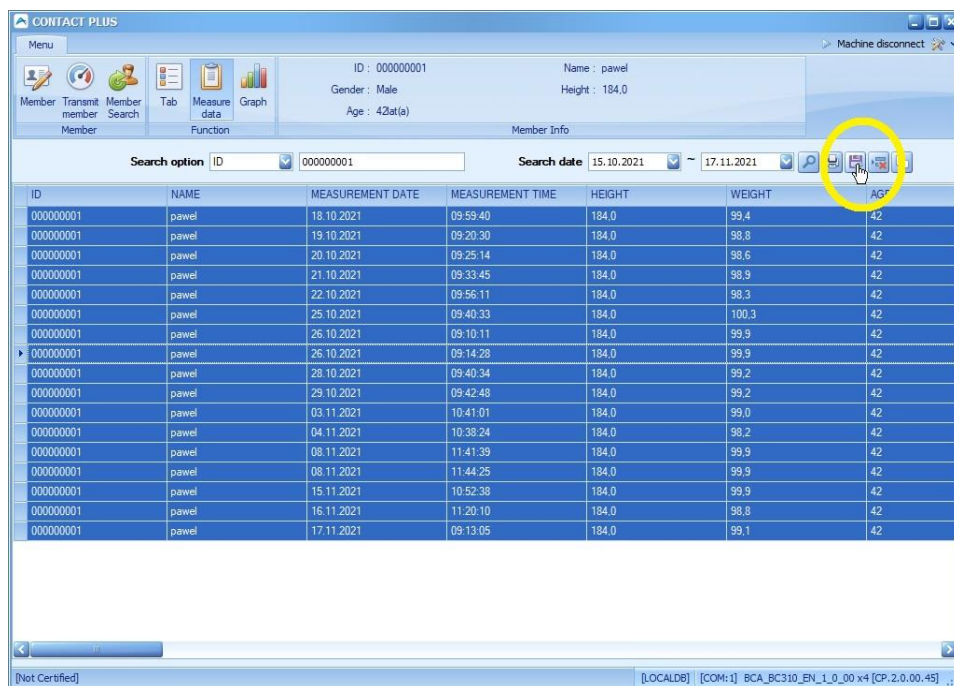

7. Jest jeszcze inny sposób, troszkę dłuższy (w zależności od danych). Przechodzimy pierwszy punkt i naciskamy ikonę dyskietki w prawym górnym rogu aplikacji (zazaczyłem na żółto w screenie po lewej). Otworzy nam się okienko systemowe do podania nazwy naszego pliku. W tym też miejscu możemy wybrać miejsce gdzie chcemy te dane zapisać.

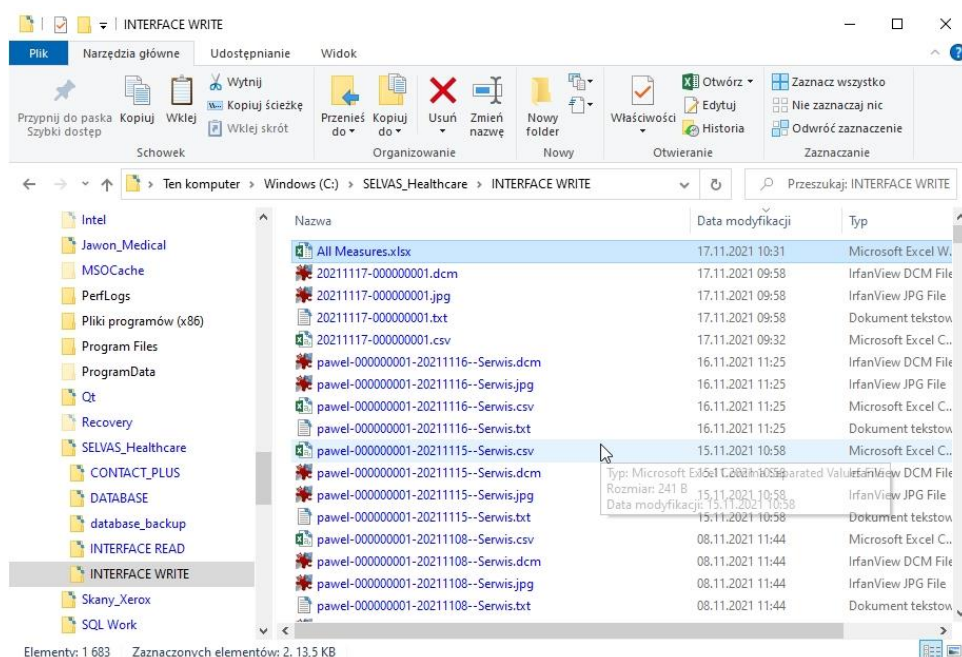

8. Ja zapisałem w tym samym katalogu w którym zapisały się poprzednie pliki.

9. Po otwarciu naszego pliku ukażą nam się te same dane co w poprzednim przykładzie ale razem z nagłówkami.

ID	NAME	MEASUREMENT DATE	MEASUREMENT TIME	HEIGHT	WEIGHT	AGE	GENDER	BOTTOM LIMIT OF WEIGHT	TOP LIMIT OF WEIGHT	STANDARD WEIGHT	LEAN BODY MASS
000000001	pawel	18.10.2021	09:59:40	184,0	99,4	42	Male	63,3	85,7	74,5	70,0
000000001	pawel	19.10.2021	09:20:30	184,0	98,8	42	Male	63,3	85,7	74,5	70,0
000000001	pawel	20.10.2021	09:25:14	184,0	98,6	42	Male	63,3	85,7	74,5	69,6
000000001	pawel	21.10.2021	09:33:45	184,0	98,9	42	Male	63,3	85,7	74,5	72,2
000000001	pawel	22.10.2021	09:36:11	184,0	98,3	42	Male	63,3	85,7	74,5	72,2
000000001	pawel	25.10.2021	09:40:33	184,0	100,3	42	Male	63,3	85,7	74,5	74,1
000000001	pawel	26.10.2021	09:10:11	184,0	99,9	42	Male	63,3	85,7	74,5	74,5
000000001	pawel	26.10.2021	09:14:28	184,0	99,9	42	Male	63,3	85,6	74,5	74,2
000000001	pawel	28.10.2021	09:40:34	184,0	99,2	42	Male	63,3	85,6	74,5	71,8
000000001	pawel	29.10.2021	09:42:48	184,0	99,2	42	Male	63,3	85,6	74,5	72,7
000000001	pawel	03.11.2021	10:41:01	184,0	99,0	42	Male	63,3	85,7	74,5	72,4
000000001	pawel	04.11.2021	10:38:24	184,0	98,2	42	Male	63,3	85,7	74,5	69,6
000000001	pawel	08.11.2021	11:41:39	184,0	99,9	42	Male	63,3	85,7	74,5	73,8
000000001	pawel	08.11.2021	11:44:25	184,0	99,9	42	Male	63,3	85,7	74,5	74,0
000000001	pawel	15.11.2021	10:52:38	184,0	99,9	42	Male	63,3	85,7	74,5	70,2
000000001	pawel	16.11.2021	11:20:10	184,0	98,8	42	Male	63,3	85,7	74,5	69,2
000000001	pawel	17.11.2021	09:13:05	184,0	99,1	42	Male	63,3	85,7	74,5	69,8