

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA - Analizatory składu ciała – Selvas Healthcare

1. Warunki przechowywania i użytkowania

- **Temperatura przechowywania:** od -20°C do 60°C.
- **Wilgotność przechowywania:** poniżej 95% (bez kondensacji).
- **Temperatura użytkowania:** od 10°C do 40°C.
- **Wilgotność użytkowania:** od 30% do 75% (bez kondensacji).
- **Ciśnienie atmosferyczne:** urządzenie nie powinno być przechowywane ani używane w warunkach, gdzie ciśnienie jest niższe niż 70 kPa (1060 mbar).

2. Instalacja i środowisko użytkowania

- Należy zapewnić stabilne podłoże do umieszczenia urządzenia.
- Unikać bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci, kurzu oraz gwałtownych zmian temperatury.
- Nie instalować ani przechowywać urządzeń w pobliżu chemikaliów, gazów lub miejsc o wysokim ryzyku korozji.
- W pobliżu urządzenia nie powinny znajdować się inne źródła silnych fal elektromagnetycznych (np. kuchenki mikrofalowe, urządzenia rentgenowskie). W miarę możliwości należy je wyłączyć lub przenieść do innego pomieszczenia, aby zapewnić dokładność pomiarów i uniknąć ryzyka zakłóceń elektrycznych.

3. Obsługa i bezpieczeństwo

- Należy używać tylko dostarczonego przez producenta kabla zasilającego i wtyczki.
- Regularnie sprawdzać stan kabla i wtyczki pod kątem uszkodzeń powłoki.
- Przed odłączeniem wtyczki zawsze należy najpierw wyłączyć urządzenie.
- Nie stawiać na urządzeniu żadnych przedmiotów ani go nie upuszczać.
- Nie demontować ani nie modyfikować urządzenia.

4. Czyszczenie i konserwacja

- **Czyszczenie:**
 - Do czyszczenia należy używać **miękkiej, suchej ściereczki**.
 - Unikać stosowania **lotnych rozpuszczalników**, takich jak benzen czy alkohol, a także wilgotnych ściereczek.
 - Kurz z urządzenia należy usuwać co 2–3 dni za pomocą suchej ściereczki.
- **Dezynfekcja:**
 - Powierzchnię urządzenia można dezynfekować **roztworem alkoholowym** lub środkiem dezynfekującym zawierającym **glutaraldehyd**.
 - Po dezynfekcji należy przetrzeć obudowę **miękką, niepylącą ściereczką**.
- **Dodatkowe zalecenia:**
 - Podczas kontaktu z elektrodami lub ich czyszczenia zaleca się stosowanie **sterylnych rękawiczek ochronnych**.
 - Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej konserwacji urządzenia.
 - Stosowanie nieodpowiednich środków czyszczących może negatywnie wpłynąć na dokładność pomiarów.

5. Postępowanie po dłuższym okresie nieużywania

- Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, przed ponownym uruchomieniem należy sprawdzić jego funkcje i prawidłowe działanie.