


Walizka transportowa na kółkach do ACCUNIQ BC310, Selvas Healthcare

Walizka do bezpiecznego transportowania analizatora składu ciała, modele: X-Contact 350F oraz Accuniq BC310 (wersje bez kolumny). W walizce znajduje się miejsce na: analizator oraz akcesoria takiej jak: kable, papier termiczny, chusteczki do dezynfekcji. Przygotowane jest też dodatkowe miejsce na miarkę obwodów i składany miernik wysokości ciała.



1. Walizka do bezpiecznego transportowania analizatora składu ciała, modele: X-Contact 350F oraz Accuniq BC310 (wersje bez kolumny). W walizce znajduje się miejsce na: analizator oraz akcesoria takiej jak: kable, papier termiczny, chusteczki do dezynfekcji. Przygotowane jest też dodatkowe miejsce na miarkę obwodów i składany miernik wysokości ciała.

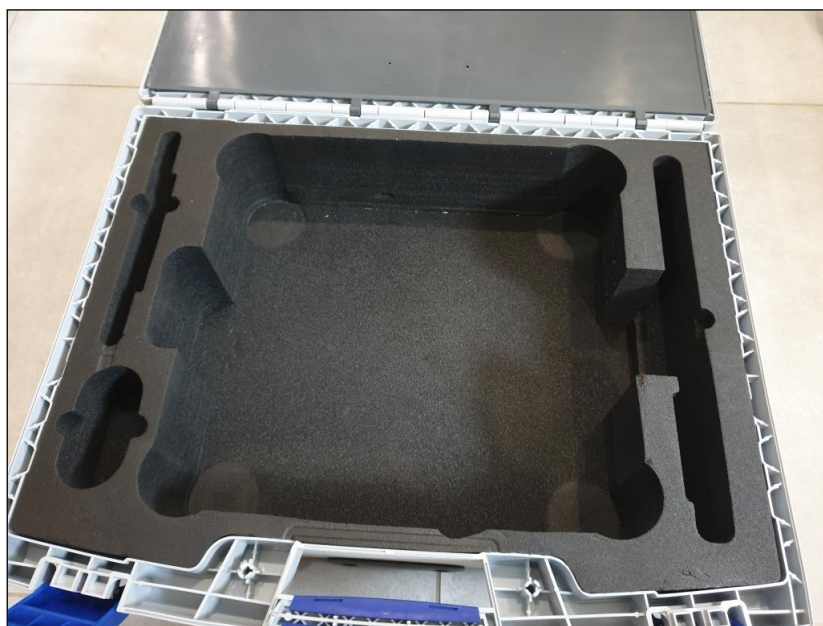


2. Aby włożyć bezpiecznie podstawę od analizatora BC310 do naszej przenośnej walizki musimy schować poziomnicę pod podstawę. Poniżej instrukcja jak tego dokonać.



3. Obracamy podstawę do góry nogami w taki sposób abyśmy mieli dobre dojście do poziomnicy.



4. Odkręcamy wkrętakiem pierwszą z brzegu śrubkę (śrubka przy krawędzi). Druga delikatnie luzujemy w taki sposób abyśmy mogli przekręcić poziomnicę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Śrubka powinna być tak poluzowana abyśmy przy chowaniu poziomnicy czuli delikatny opór.

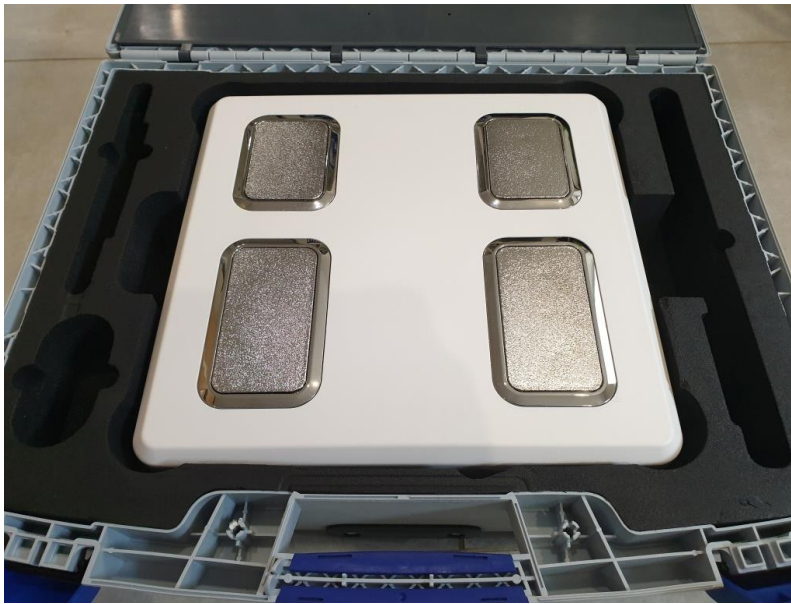

5. Po schowaniu poziomnicy pod podstawę możemy już teraz bez problemu włożyć wagę do walizki.

Poniższe zdjęcie przedstawia prawidłowe ułożenie analizatora i kompletu akcesoriów w walizce.

