

BC.310. INSTRUKCJA WYMIANY PAPIERU TERMICZNEGO



Analizator BC-310 posiada wbudowaną drukarkę termiczną. Technologia druku termicznego umożliwia szybki druk na papierze termicznym. W tego typu drukarce nie jest wymagane wymiana tuszy, atramentów czy też innych materiałów eksploatacyjnych. Jedyną wymianą w tego typu drukarkach to jest papier termiczny. Specyfikacja papieru termicznego na końcu niniejszej instrukcji.

Pokrywa od komory w której znajduje się papier termiczny posiada dwie blokady. Jedna w górnej części pokrywy, druga z lewej strony.



Aby dostać się do komory papieru termicznego naciskamy blokady na pokrywie i unosimy pokrywę do góry. Odkładamy ją w bezpieczne miejsce.



W przypadku nowego analizatora w środku ukaże nam się tylko tulejka do założenia papieru termicznego, a w przypadku wymiany papieru termicznego ukaże nam się rolka z papierem termicznym którą wyciągamy.



Wyciągamy tulejkę i nakładamy nową rolkę papieru termicznego w taki sposób jak jest na załączanym zdjęciu. W przypadku zamontowania odwrotnie papier nie będzie drukował ale będzie normalnie wysuwał się ze szczeliny w pokrywie.

Papier termiczny ma tylko jedną stronę aktywną i termoczułą dlatego bardzo ważne jest odpowiednie założenie papieru.



Wkładamy papier wraz z rolką w miejsce do tego przeznaczone.



Rolka papieru powinna wychodzić jak na zdjęciu obok. Zamontowanie rolki w inny sposób doprowadzi do sytuacji w której podczas wydruku na papierze termicznym nie będzie widać żadnych informacji.



Trzymając za końcówkę papieru wkładamy ostrożnie pokrywę komory papieru termicznego zwracając uwagę na bolce w pokrywie aby weszły w otworki które znajdują się w obudowie analizatora.



Delikatnie wciskamy pokrywę aby wskoczyła w swoje miejsce i aby przyciski zabezpieczające zamknęły szczelnie pokrywę.

W momencie gdy pokrywa zaskoczy w swoje miejsce drukarka samoistnie wysunie kilka centymetrów papieru termicznego i przytnie go w odpowiednim miejscu co jest sygnałem na poprawność działania.

Drukarka termiczna gotowa do drukowania pomiarów.

SPECYFIKACJA PAPIERU TERMICZEGO – Rolka termiczna 57 mm (szerokość) x 30 mb (długość).

Rolka jest podatna na ilość światła słonecznego więc dobrze jest trzymać zapas rolek w zaciemnionym miejscu

MOŻLIWE BŁĘDY I PROBLEMY DRUKARKI TERMICZNEJ.

1. Po wymianie papieru i przeprowadzeniu pomiaru drukarka wysuwa papier ale nic na nim nie widać. (możliwe wykonanie pomiaru)
 - Prawdopodobnie papier został zamontowany odwrotnie. Należy otworzyć pokrywę i zamontować papier drugą stroną.
 - Gdy nadal nie mamy poprawnego wydruku proszę sprawdzić inną rolkę.
 - Po tych czynnościach w przypadku nadal braku wydruku proszę skontaktować się z serwisem. Prawdopodobnie będzie wymagana wymiana drukarki termicznej.
2. Informacja na wyświetlaczu „Pokrywa drukarki termicznej jest otwarta”. (wykonanie pomiaru niemożliwe).
 - Proszę spróbować domknąć pokrywę.
 - Wyciągnąć pokrywę i sprawdzić czy nic nie blokuje poprawnego zamknięcia pokrywy.
 - Sprawdzić szczególnie miejsca pod blokadami i pod bolcami prowadzącymi.
 - Drukarka posiada kilka czujników sprawdzających poprawność zamontowania papieru i zamknięcia pokrywy. W przypadku uszkodzenia jednego z nich będzie wymagana wymiana drukarki termicznej.
3. Drukarka nie reaguje w żaden sposób na działania użytkownika.
 - Prawdopodobnie nastąpiło uszkodzenie drukarki termicznej, lub/i uszkodzenie płytki PCB sterującej mechanizmem drukarki termicznej. Wymagana wymiana.