

Sposób umieszczenia stóp na elektrodach wbudowanych w platformę urządzenia. Należy umieścić stopy w odpowiedni sposób.



Sposób umieszczenia dłoni na uchwytach z elektrodami. Należy w taki sposób przytrzymać uchwyty, aby wszystkie 4 palce dotykały elektrody.



Należy upewnić się, że pacjent odchyli ramiona od tułowia w taki sposób, aby powstała przestrzeń pod pachami. W przypadku trudności można odizolować ciało ręcznikiem.

